

Adbiojal[®] F⁰⁰⁰⁰

Cancella i segni del tempo



RUGHE FRONTALI

VOLUME SOPRACCIGLIA

VOLUME PERIOCULARI

VOLUME ZIGOMI

VOLUME GUANCE

RUGHE PERIORALI

RUGHE DA MARIONETTA

VOLUME MENTO

RUGHE GLABELLARI

SOLCHI NASO GENIENI

FILTRO E ARCO DI CUPIDO

COMMISSURE LABIALI

CONTORNO E VOLUME LABBRA

RUGHE COLLO


- L'acido ialuronico cross-linkato di Adbiojal F ha un peso molecolare compreso tra 1300 - 1800 KD ed è derivato dalla fermentazione batterica dello Streptococco Zooepidermicus.
- Dispositivo medico sterile di classe III formulato con la tecnologia DUAL LINK che combina acido ialuronico cross-linkato purissimo e lineare nel medesimo prodotto.
- Effetto istantaneo grazie all'acido ialuronico lineare, effetto durevole nei mesi grazie all'acido ialuronico cross-linkato.
- Massima soddisfazione del medico e del paziente.
- In virtù della sua peculiare struttura reticolata, interagisce efficacemente con migliaia di molecole d'acqua, riempiendo le depressioni cutanee, le rughe e le cicatrici. Allo stesso tempo idrata i tessuti circostanti l'area di incolo, donando un aspetto più giovane e sano.
- Soluzioni con viscosità differenziata (20 - 25 - 30 mg/ml) per tre diverse tipologie di filler.
- Medical Device CE 0373 - Made in Italy

Adbiojal[®]F^{○○○}

SOLUZIONI DI VISCOSITÀ DIVERSE PER TRE DIVERSE TIPOLOGIE DI FILLER

F20

Soft

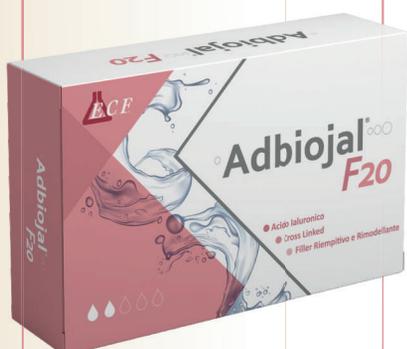

Gel a base di acido ialuronico reticolato per impianto intradermico.

Indicazioni: Correzione e riempimento di piccoli inestetismi, rughe sottili o superficiali del viso.

Concentrazione dell'acido ialuronico: 20 mg/ml
Residuo di BDDE: <0.1 ppm
Peso molecolare dell'acido ialuronico in partenza: 1300-1800 KD
Grado di reticolazione: 1,5
pH: 7,0-8,0
Endotossine batteriche: < 0,5 U.E/ml
Volume: 1 siringa da 1 ml
Aghi consigliati: 27G, 30G e 32G
Zone preposte: epidermide.

F25

Medium



Gel a base di acido ialuronico reticolato per impianto intradermico.

Indicazioni: Riempimento delle depressioni del volto, pieghe nasolabiali, labbra e rughe di media profondità.

Concentrazione dell'acido ialuronico: 25 mg/ml
Residuo di BDDE: <0.1 ppm
Peso molecolare dell'acido ialuronico in partenza: 1300-1800 KD
Grado di reticolazione: 2,5
pH: 7,0-8,0
Endotossine batteriche: < 0,5 U.E/ml
Volume: 1 siringa da 1 ml
Aghi consigliati: 27G, 30G - cannula
Zone preposte: derma.

F30

Strong




Gel a base di acido ialuronico reticolato per impianto intradermico.

Indicazioni: Riempimento o ripristino volumetrico delle guance, zigomi e linea mandibolare.

Concentrazione dell'acido ialuronico: 30 mg/ml
Residuo di BDDE: <0.1 ppm
Peso molecolare dell'acido ialuronico in partenza: 1300-1800 KD
Grado di reticolazione: 3,5
pH: 7,0-8,0
Endotossine batteriche: < 0,5 U.E/ml
Volume: 1 siringa da 1 ml
Aghi consigliati: 25G, 27G - cannula
Zone preposte: subcutaneo.



○ Adbiojal® F○○○

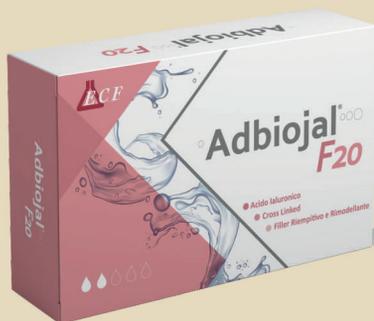

Energie Chimico Farmaceutiche
Roma - Italia
www.energiechimicofarmaceutiche.com